

PLATRIX

BENDA GESSATA A PRESA RAPIDA

DESCRIZIONE E INDICAZIONI D'USO	Benda gessata a presa rapida, cremosa e resistente, per il confezionamento di apparecchi gessati. Adatta a tutti i tipi di intervento in ortopedia e traumatologia.
COMPOSIZIONE DEL SUPPORTO	Cotone puro sbiancato Peso supporto: 23g/m ² Conto fili: 17/ cm ² (tessitura a tramatura doppia)
COMPOSIZIONE DELLA MASSA GESSATA	Gesso di origine naturale (>85%) e leganti cellulosici e vinilici per permettere alla massa di aderire al supporto
CARATTERISTICHE TECNICHE	<u>Peso complessivo:</u> 500g/m ² ±10% <u>Tempo di presa:</u> 125-155 secondi (iniziale) <u>Tempo di imbibizione:</u> 4 secondi a 25±2°C <u>Tempo di immersione:</u> 3-5 sec. <u>Resistenza:</u> a 30 minuti (16 strati)- 15N/cm minimo – 5Kg/dm (8 strati) Resistenza a secco a 12h: 14.29 Kg <u>Perdita gesso:</u> 9±3% <u>Umidità:</u> trattenuta 38% massimo residua (10 ore a 37°C) 11% massimo <u>Permeabilità ai raggi X:</u> all'esame radiologico effettuato applicando i parametri (indici di dose efficace) previsti nei protocolli standard l'apparecchio gessato presenta una radiotrasparenza del 40%. Il prodotto non contiene resine e gomme naturali (lattice) che rappresentino un potenziale allergenico.
AVVERTENZE PER L'USO	Per evitare danni esotermici al paziente, non aggiungere alcun altro ingrediente all'acqua di immersione per accelerare il tempo di presa, e non immergere le bende in acqua con temperatura superiore a 25°C. Attendere almeno 30 minuti dopo aver confezionato il gesso prima di mobilizzare il paziente.
COMPATIBILITA	Il prodotto correttamente utilizzato non viene a contatto con prodotti chimici o farmaceutici.
BIOCOMPATIBILITA' ED ATOSSICITA'	Tutti i materiali utilizzati nella preparazione delle materie prime sono atossici.
STERILIZZABILITA'	Il prodotto è fornito non sterile. Il prodotto non è sterilizzabile.
CONFEZIONAMENTO	<u>Bende:</u> Unità d'uso: due bende singole in involucro termosaldato di polipropilene a tenuta di umidità. Unità di vendita: a seconda della misura, confezione da 20, 40, 60 o 80 bende. <u>Stecche:</u> Unità d'uso e unità di vendita: in busta di plastica, contenuta in scatola in cartone/dispenser. L'unità d'uso è identificabile BSN ai fini di campionatura di gara
AVVERTENZE PER LA CONSERVAZIONE	Il prodotto deve essere conservato all'asciutto e ad una temperatura inferiore a 30°C. La vita utile del prodotto correttamente conservato è di tre anni.
SMALTIMENTO	Combustione controllata o interrimento secondo le direttive ambientali locali.
MARCHIO CE	Prodotto conforme alla direttiva 93/42/CEE – Dispositivo medico – Classe I
CODICE CND	M03050201

PLATRIX

BENDA GESSATA A PRESA RAPIDA

Continua/2

NUMERO DI REPERTORIO	12591/R
PRODUTTORE	Prodotto da BSN medical SA - Vibraye-Francia e distribuito da BSN medical S.r.l. , Viale Colleoni 17, 20864, Agrate Brianza (MB)

CODICI	NUOVI CODICI	DIMENSIONI	UNITA' D'USO	CONFEZIONE PRIMARIA (multiplo d'ordine)	CONFEZIONE SECONDARIA (multiplo d'ordine e di imballo)
48615206	71996-00001-00	6cmx2m	2 rotoli in busta di plastica	20 bende	20 bende
48615208	71996-00023-00	8cmx2m	2 rotoli in busta di plastica	20 bende	20 bende
6151050	71996-00004-00	10cmx2m	2 rotoli in busta di plastica	40 bende	40 bende
48615212	71996-00000-00	12cmx2m	2 rotoli in busta di plastica	20 bende	20 bende
6151100	71996-00005-00	15cmx2m	2 rotoli in busta di plastica	40 bende	40 bende
6151150	71996-00006-00	20cmx2m	2 rotoli in busta di plastica	20 bende	20 bende
48615306	71996-00024-00	6cmx3m	2 rotoli in busta di plastica	40 bende	40 bende
48615308	71996-00025-00	8cmx3m	2 rotoli in busta di plastica	20 bende	20 bende
6152050	71996-00010-00	10cmx3m	2 rotoli in busta di plastica	40 bende	40 bende
48615312	71996-00002-00	12cmx3m	2 rotoli in busta di plastica	20 bende	20 bende
6152100	71996-00012-00	15cmx3m	2 rotoli in busta di plastica	40 bende	40 bende
6152150	71996-00014-00	20cmx3m	2 rotoli in busta di plastica	20 bende	20 bende
48615406	71996-00029-00	6cmx4m	2 rotoli in busta di plastica	80 bende	80 bende
48615408	71996-00030-00	8cm x 4m	2 rotoli in busta di plastica	40 bende	40 bende
48615410	71996-00026-00	10cmx4m	2 rotoli in busta di plastica	40 bende	40 bende
48615412	71996-00027-00	12cmx4m	2 rotoli in busta di plastica	40 bende	40 bende
48615415	71996-00003-00	15cmx4m	2 rotoli in busta di plastica	40 bende	40 bende
48615420	71996-00028-00	20cmx4m	2 rotoli in busta di plastica	20 bende	20 bende
48615510	71997-00000-00	stecca - 4 strati 10cmx20m	1 stecca	1 stecca	1 stecca
48615512	71997-00001-00	stecca - 4 strati 12cmx20m	1 stecca	1 stecca	1 stecca
48615515	71997-00002-00	stecca - 4 strati 15cmx20m	1 stecca	1 stecca	1 stecca
48615520	71997-00003-00	stecca - 4 strati 20cmx20m	1 stecca	1 stecca	1 stecca