

FARMAC-ZABBAN S.p.A. Via Persicetana, 26 – Calderara di Reno (BO) Tel. +39 051-318411 - Fax +39 051 – 318472 e-mail : company@farmaczabban.it	DMR104-05-fill
	Rev. 00 15-09-2010
Medicazioni Alginato	

FOGLIETTO ILLUSTRATIVO PER MEDICAZIONI ALGINATO

Descrizione del prodotto

Farmactive_α Alginato è un alginato calcico-sodico, disponibile in compressa e nastro conformabili in grafo di creare l'ambiente ideale per il risanamento di ferite con essudato.

Indicazioni

Farmactive_α Alginato è indicato per il trattamento di ferite da moderatamente a fortemente essudanti, quali:

- ulcere da decubito
- ulcere agli arti inferiori
- ferite con cavità
- sedi di trapianto cutaneo

Controindicazioni

L'uso di Farmactive_α Alginato non è indicato per il trattamento di:

- ustioni di terzo grado
- ferite asciutte
- impianti chirurgici

Precauzioni

La medicazione potrebbe aderire qualora sia applicata su ferite che presentano solo un leggero essudato. Se la medicazione non è facilmente asportabile, è necessario inumidirla con soluzione salina sterile prima di rimuoverla.

Non utilizzare in pazienti notoriamente sensibili agli Alginati. Farmactive_α Alginato non è indicato per il trattamento di ferite abbondantemente sanguinanti.

Istruzioni per l'uso

Preparazione

- Sbrigliare, se necessario, ed irrigare la ferita in accordo con i protocolli standard
- Rimuovere la soluzione salina in eccesso ed asciugare la pelle sana circostante

Applicazione

- Tagliare o piegare la medicazione in base alla dimensione della ferita. In caso di ferite profonde colmare la cavità della ferita.
- Nel caso di ferite con abbondante essudato, applicare la medicazione direttamente sulla ferita.
- Coprire e fissare con una medicazione secondaria idonea.

Cambio della medicazione

Può rimanere in sito fino a 7 giorni, a seconda delle condizioni del paziente e del livello di essudato. Inizialmente potrebbe essere necessario sostituire la medicazione ogni 24 ore o ogni qualvolta le condizioni della ferita lo rendano necessario.

Per una nuova applicazione rimuovere delicatamente la medicazione secondaria. Se la ferita appare asciutta, irrigare la medicazione con soluzione salina prima di rimuoverla.

Rimuovere delicatamente la medicazione dalla ferita.

Irrigare la ferita prima di applicare una nuova medicazione

Avvertenze

Non riutilizzare. Non sterilizzare nuovamente. Non utilizzare se la confezione è danneggiata o aperta. La data di scadenza è indicata sul prodotto.

Conservazione

Conservare a temperatura ambiente

Biocompatibilità.

A seguito di studi clinici condotti su animali da laboratorio si è dimostrato che Farmactive_α Alginato risulta non tossico e non provoca alcun fenomeno allergico o di irritazione cutanea.

Smaltimento

Il dispositivo verrà smaltito come normale rifiuto clinico in accordo alle normative locali vigenti

Data di emissione 15-09-2010

DMR104- Sezione Descrizione Istruzioni per l'uso – foglietto illustrativo	Pagina 1 di 1
---	---------------