

## Descrizione

3M Tegaderm™, medicazione idrocolloide, è una medicazione sterile che consiste di un adesivo ipoallergenico idrocolloide con pellicola adesiva trasparente esterna. La pellicola è permeabile a umidità e vapore mentre è impermeabile a liquidi, batteri e virus.\* Questo prodotto non è progettato, non viene venduto e non deve essere usato diversamente da quanto indicato.

\*Test di laboratorio hanno provato che la pellicola costituisce una barriera contro i virus HIV-1 e dell'epatite B, se la medicazione resta intatta e non si hanno perdite.

Sulla zona della ferita, la medicazione idrocolloide Tegaderm™ interagisce con i liquidi della ferita stessa creando una massa morbida, semitrasparente e assorbente. La medicazione, inoltre, consente di mantenere umido l'ambiente della ferita, ottimizzando il processo di cicatrizzazione.

## Indicazioni per l'uso

La medicazione idrocolloide Tegaderm™ per l'uso sulla zona sacrale è indicata per le ulcere dermiche a spessore parziale e a tutto spessore, per le ferite superficiali, per le ustioni di primo e secondo grado e nelle zone di prelievo per trapianti. È molto utile nelle zone del corpo problematiche in quanto a forma e conformazione della medicazione. Esempi di queste aree sono i talloni, i gomiti, la mammella e la zona sacrale dei glutei.

## Controindicazioni

Nessuna avvertenza nota.

## Avvertenze

Nessuna avvertenza nota.

## Precauzioni

1. Il trattamento di qualsiasi ulcera cutanea deve far parte di un programma ben definito per il trattamento delle ulcere ed essere supervisionato da un operatore sanitario.
2. Può accadere che utilizzando una la medicazione idrocolloide Tegaderm™ la ferita inizialmente appaia più estesa e più profonda in quanto si ha un processo di eliminazione del tessuto non necessario. Questa iniziale estensione dovrebbe essere comunque accompagnata da un miglioramento nell'aspetto della ferita. Se dopo i primi cambi di medicazione la ferita dovesse apparire ancora più estesa, si consiglia di rivolgersi a personale sanitario specializzato.
3. Osservare l'ulcera per scoprire eventuali segni di infezione. In caso di infezione (indicata da presenza di febbre, aumento del dolore, arrossamento, gonfiore oppure odore o essudati anomali) consultare un operatore sanitario. La medicazione idrocolloide Tegaderm™ può essere utilizzata su ferite infette solo sotto la supervisione di un operatore sanitario.
4. Raramente in alcune ferite, sotto le medicazioni idrocolloidi, si possono sviluppare irritazioni (arrossamento, infiammazione), macerazione (sbiancamento della cute) o ipergranulazione (eccessiva formazione di tessuto). Nel caso in cui si riscontrassero tali fenomeni, consultare un medico.
5. Se la ferita non inizia a presentare segni di guarigione o se si verificano altri sintomi inaspettati, consultare un operatore sanitario.

## Istruzioni per l'uso


### Prima di usare la medicazione:

1. Rasare i peli in eccesso per migliorare il comfort del paziente.
2. Detergere la cute e la ferita con estrema cura.
3. Attendere che la cute sia ben asciutta prima di applicare la medicazione.
4. Se la cute del paziente si danneggia con facilità o si prevede che l'essudato vada oltre il margine della ferita, si può applicare un film barriera.

### Applicazione della medicazione:

1. Prima di togliere la carta protettiva, ripiegare a metà la medicazione (Figura 1).
2. Tenere insieme le estremità della medicazione. Togliere la pellicola protettiva su un lato della medicazione (fondo) esponendo l'adesivo (Figura 2).
3. Continuare a togliere la pellicola protettiva dall'altro lato fino a completa esposizione della sua superficie adesiva (Figura 3).
4. Tenendo entrambe le linguette, posizionare la medicazione sulla ferita, inclinandola verso il basso (Figura 4). Allargare le natiche per ottenere un posizionamento migliore. Posizionare dapprima l'incisura della medicazione nella regione sacrale. Questo servirà a ridurre al minimo la possibilità di contaminazione della ferita dovuta ad incontinenza o increspature del cerotto.
5. Premere delicatamente il lato adesivo del cerotto facendo scorrere le dita dal centro verso l'esterno. Evitare di tirare la medicazione o la cute (Figura 5).
6. Rimuovere la cornice della medicazione, iniziando dalla parte superiore e tirando verso il basso (Figura 6). Non sollevare il bordo della pellicola. Premere e appianare la medicazione dal centro verso la periferia. Ripetere fino alla rimozione di tutte le sezioni della cornice.

**Nota:** La medicazione va cambiata in caso di perdite, di distacco o dopo 7 giorni di permanenza sulla ferita.

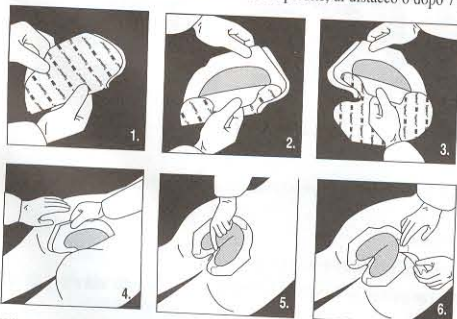

### Rimozione della medicazione:

1. Sollevare con cura i bordi della medicazione dalla cute. Se vi sono difficoltà nel sollevare la medicazione, applicare un nastro adesivo al bordo della medicazione e utilizzarlo per sollevarla.
2. Continuare a sollevare i bordi fino al completo distacco dalla superficie cutanea.
3. Togliere la medicazione lentamente, ripiegandola su se stessa. Tirare con cautela in direzione della crescita dei peli.

**Nota:** Non è raro che le ferite emanino odore. Lo si può notare quando la medicazione viene tolta o quando si verificano perdite. L'odore deve scomparire dopo che la ferita è stata pulita.

### Conservazione e durata

Per ottenere migliori risultati, conservare a temperatura ambiente. Evitare l'esposizione della medicazione al calore o all'umidità eccessivi. Per la durata, vedere la data di scadenza indicata sulla confezione.

### Confezioni

## Confezioni

prodotto monouso in confezione individuale. Sterile purché la confezione non sia stata danneggiata o aperta.

Per informazioni o commenti, negli USA contattare la linea diretta dell'assistenza clienti 3M al numero 1-800-228-3957.

In Canada, contattare 3M Canada, Inc., P.O. Box 5757, London, Ontario, N6A 4T1, 1-800-268-9696.

In paesi diversi dagli Stati Uniti, contattare il rappresentante locale 3M.

## Legenda dei simboli



- Sterile se la busta è chiusa e intatta