

3M™ Tegaderm™ Medicazione idrocolloide e 3M™ Tegaderm™ Medicazione idrocolloide sottile - Ovale

DESCRIZIONE

Tegaderm™ 3M, medicazione idrocolloide e Tegaderm™ 3M medicazione idrocolloide sottile, sono medicazioni sterili che consistono di un adesivo ipoallergenico idrocolloide con pellicola adesiva trasparente esterna. La pellicola è permeabile a umidità e vapore mentre è impermeabile a liquidi, batteri e virus.* Questo prodotto non è progettato, non viene venduto e non deve essere usato diversamente da quanto indicato.

*Test di laboratorio hanno provato che la pellicola costituisce una barriera contro i virus HIV-1 e dell'epatite B, se la medicazione resta intatta e non si hanno perdite.

Sulla zona della ferita, Tegaderm™, medicazione idrocolloide e medicazione idrocolloide sottile, interagiscono con i liquidi della ferita stessa creando una massa morbida, semitrasparente e assorbente. La medicazione, inoltre, consente di mantenere umido l'ambiente della ferita, ottimizzando il processo di cicatrizzazione.

Indicazioni per l'uso

Tegaderm™ medicazione idrocolloide indicata per ulcere del derma parziali o di grande spessore, inclusi: ulcere da compressione, ferite superficiali, abrasioni, bruciature di primo e secondo grado e siti donatore.

Tegaderm™ medicazione idrocolloide sottile è indicata per ulcere dermiche parziali, ulcere degli arti inferiori, ferite superficiali, abrasioni, ustioni di primo e secondo grado e nelle zone di prelievo per trapianti. Inoltre, può anche essere usato come cerotto protettivo su pelli a rischio, su pelli sane o su pelli che cominciano a mostrare segni di danneggiamento dovuto ad attrito o tagli.

Controindicazioni

Nessuna avvertenza nota.

Avvertenze

Nessuna avvertenza nota.

Precauzioni

1. Il trattamento di qualsiasi ulcera cutanea deve far parte di un programma ben definito per il trattamento delle ulcere ed essere supervisionato da un operatore sanitario.
2. Utilizzando Tegaderm™ medicazione idrocolloide e medicazione idrocolloide sottile, la ferita può inizialmente sembrare di dimensioni e profondità maggiori dato che il tessuto superfluo viene eliminato. Questa iniziale estensione dovrebbe essere comunque accompagnata da un miglioramento nell'aspetto della ferita. Se dopo i primi cambi di medicazione la ferita dovesse apparire ancora più estesa, si consiglia di rivolgersi a personale sanitario specializzato.
3. Osservare l'ulcera per scoprire eventuali segni di infezione. In caso di infezione, riconoscibile da segni quali febbre, aumento del dolore, arrossamento, sanguinamento, gonfiore, odori insoliti o suppurazione della ferita, rivolgersi a personale sanitario specializzato. Tegaderm™ medicazione idrocolloide e Tegaderm™ medicazione idrocolloide sottile possono essere utilizzate su ferite infette solo sotto la supervisione di un operatore sanitario.
4. Raramente in alcune ferite, sotto le medicazioni idrocolloidi, si possono sviluppare irritazioni (arrossamento, infiammazione), macerazioni (sbiancamento della cute) o ipergranulazione (eccessiva formazione di tessuto). Nel caso in cui si riscontrassero tali fenomeni, consultare un medico.
5. Se la ferita non inizia a mostrare segni di guarigione o se si manifesta qualsiasi altro sintomo inatteso, consultare un operatore sanitario professionista.

Istruzioni per l'uso

Prima di usare la medicazione:

1. Rasare i peli in eccesso per migliorare il comfort del paziente.
2. Detergere la cute e la ferita con estrema cura.
3. Attendere che la cute sia ben asciutta prima di applicare la medicazione.
4. Se la cute del paziente si danneggia con facilità o si prevede che l'essudato vada oltre il margine della ferita, si può applicare un film barriera.
5. Ispezionare la ferita e scegliere la dimensione appropriata per la medicazione in modo che questa si estenda oltre la ferita di 2,5 cm (1 pollice) compreso il bordo adesivo.

Applicazione della medicazione:

1. Togliere la protezione di carta dalla medicazione sollevando e tirando una delle linguette quadrate con il segno "1" per esporre la superficie adesiva (Figura 1). Toccare il meno possibile il bordo o il lato adesivo (basso) della medicazione.
2. Centrare il cerotto sulla ferita. Premere delicatamente il lato adesivo del cerotto facendo scorrere le dita dal centro verso l'esterno. Evitare di tirare la medicazione o la cute (Figura 2).
3. Premere e lisciare i bordi della pellicola per migliorare l'aderenza (Figura 3).
4. Togliere la pellicola superficiale sollevando una delle linguette centrali con il segno "2" e tirando verso il bordo della medicazione (Figura 4). Lisciare i bordi della medicazione mentre si rimuove la pellicola. Togliere l'altro lato della pellicola superficiale nello stesso modo.
5. Tagliare delicatamente lungo la linea perforata le linguette terminali quadrate con il segno "1" tirando verso il basso e gettarle via (Figura 5). Evitare di sollevare il bordo della pellicola mentre si tolgono le linguette. Fissare i bordi della pellicola premendo con forza.

Nota: La medicazione va cambiata in caso di perdite, di distacco o dopo 7 giorni di permanenza sulla ferita.

Applicazione della medicazione su talloni o gomiti:

1. Tagliare la medicazione ovale dall'estremità della linguetta verso il centro (Figura 6).
2. Fissare la parte non tagliata della medicazione al tallone o al gomito (Figura 7).
3. Fissare una metà del lato tagliato della medicazione alla parte superiore del tallone o del gomito (Figura 8).
4. Togliere la pellicola superficiale e la linguetta dalla medicazione sulla parte superiore di tallone o gomito (Figura 9).
5. Fissare la restante metà della parte tagliata della medicazione, sovrapponendola alla parte già applicata (Figura 10). Togliere la parte restante di pellicola e linguette superficiali.
6. Fissare i margini tagliati premendo con forza (Figura 11).

Rimozione della medicazione:

1. Sollevare con cura i bordi della medicazione dalla cute. Se vi sono difficoltà nel sollevare la medicazione, applicare un nastro adesivo al bordo e utilizzarlo per sollevare la medicazione.
2. Continuare a tirare la pellicola sollevandola fino a quando tutti i bordi non si siano staccati dalla superficie cutanea.
3. Togliere la medicazione lentamente, ripiegandola su se stessa. Tirare con cautela in direzione della crescita dei peli.

Nota: Non è raro che le ferite emanino odore. Lo si può notare quando la medicazione viene tolta o quando si verificano perdite. L'odore deve scomparire dopo che la ferita è stata pulita.

Conservazione e durata

Per ottenere migliori risultati, conservare a temperatura ambiente. Evitare l'esposizione della

Italiano

Nota: Non è raro che le ferite emanino odore. Lo si può notare quando la medicazione viene tolta o quando si verificano perdite. L'odore deve scomparire dopo che la ferita è stata pulita.

Conservazione e durata

Per ottenere migliori risultati, conservare a temperatura ambiente. Evitare l'esposizione della medicazione al calore o all'umidità eccessivi. Per la durata, vedere la data di scadenza indicata sulla confezione.

Confezioni

prodotto monouso in confezione individuale. Sterile purché la confezione non sia stata danneggiata o aperta.

Per domande o commenti, negli Stati Uniti contattare la 3M Health Care Customer Helpline al numero 1-800-228-3957.

In Canada, contattare 3M Canada, Inc., PO Box 5757, London, Ontario, N6A 4T1, 1-800-268-9696.

In paesi diversi dagli Stati Uniti, contattare il rappresentante locale 3M.

Descrizione dei simboli



• Sterile se la busta è chiusa e intatta

