

3M™ Tegaderm™ Medicazione trasparente con cornice
1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1634, 1622W, 1623W, 1624W, 1626W,
9505W, 9506W

3M™ Tegaderm™ HP Medicazione trasparente con cornice
9519HP, 9534HP, 9536HP, 9543HP, 9545HP, 9546HP, 9548HP

3M™ Tegaderm™ Medicazione trasparente con bordo
1614, 1616

3M™ Tegaderm IV™ Medicazione in film trasparente con bordo in Tnt
1610, 1633, 1635, 1650, 1655, 9525HP

3M™ Tegaderm™ Medicazione trasparente First Aid
1620, 1621

IT

Descrizione del prodotto

Tegaderm™ Film consiste in un sottile supporto in film e in un adesivo ipoallergenico, privo di lattice. Tegaderm™ Film con bordi presenta intagli ed è rinforzato con tessuto non tessuto, per fornire un miglior sigillo intorno a cateteri e ad altri dispositivi. La medicazione ha un'alta permeabilità all'ossigeno e al vapore acqueo. È resistente all'acqua e impermeabile ai liquidi, ai batteri e ai virus. *La medicazione intatta costituisce un'efficace barriera protettiva contro gli agenti contaminanti esterni.

*I test in vitro mostrano che le medicazioni in film Tegaderm™ e Tegaderm™ HP forniscono una barriera ai virus di 27 nm di diametro o superiore, se la medicazione resta intatta e senza perdite.

Indicazioni d'uso

Tegaderm™ Film può essere usato per coprire e proteggere i siti di inserzione dei cateteri e le ferite, per mantenere un ambiente umido necessario alla guarigione o per facilitare lo sbrigliamento autolitico, come medicazione secondaria, come protezione su cute a rischio, per fissare strumenti alla cute, per coprire ustioni di primo e secondo grado e come protezione per gli occhi. Non utilizzare la medicazione in sostituzione di suture o altri metodi di chiusura primaria delle ferite.

Precauzioni

1. Prima di applicare la medicazione, arrestare un eventuale sanguinamento del sito.
2. Non tendere la medicazione durante l'applicazione, in quanto la tensione potrebbe causare traumi alla cute.
3. Assicurarsi che la cute sia pulita, priva di residui di sapone e lozioni e venga lasciata asciugare bene prima di applicare la medicazione, per prevenire le irritazioni cutanee e avere una buona adesione.
4. La medicazione può essere utilizzata su un sito infetto, solo sotto la diretta osservazione di personale sanitario.
5. Pomate antimicrobiche contenenti glicoli polietilenici possono compromettere la resistenza delle medicazioni in film trasparente Tegaderm™ HP.
6. Le medicazioni trasparenti Tegaderm™ non possono essere risterilizzate con irraggiamento gamma, e-beam né con vapore.

Istruzioni per l'uso: Fare riferimento alle figure.

Validità del prodotto: Per la conservazione, fare riferimento alla data di scadenza indicata sulla confezione.

Legenda dei simboli

 Non utilizzare se la confezione è danneggiata o aperta

 Il prodotto e la confezione non contengono lattice di gomma o naturale

© 2011, 3M. Tutti i diritti riservati.

3M e Tegaderm sono marchi di 3M.

3M™
1626
9505

3M™
9519

3M™
1614

3M™
1610

3M™
1620

Prod
Tegade
Film m
voor ee
zuurste
en viru

*Uit in
bieden

Indic
Tegade
insteek
als een
materi
zorgen
is niet

Voor
1. Stop
2. Bre
3. Zor
aan
4. Het
ond
5. Anti
6. Tega

Gebru
Houdb
Verki





© 2011
3M and