

SOFARDRESS – non adesiva

Medicazione sterile in schiuma poliuretanica per il trattamento di ferite acute e croniche

Descrizione del prodotto

SOFARDRESS è una linea di medicazioni avanzate di nuova concezione, a base di schiuma poliuretanica.

La membrana in schiuma poliuretanica di SOFARDRESS è caratterizzata da strutture polimeriche microcellulari aperte, altamente idrofile ed estremamente soffici, con elevatissima capacità di adsorbimento dell'essudato e proprietà antiaderenti al letto della ferita e quindi in grado di lasciare intatto il tessuto di granulazione; peculiarità quest'ultima che rende atraumatica ed indolore la rimozione della medicazione al momento del ricambio.

La superficie esterna della membrana SOFARDRESS è ricoperta da una pellicola protettiva in poliuretano traspirante che consente uno scambio dei gas della ferita (ossigeno, anidride carbonica e vapore acqueo) con l'atmosfera. La pellicola è inoltre impermeabile ai liquidi, formando in tal modo una barriera al passaggio dei batteri, che protegge la ferita dal rischio di infezioni.

Rispetto alle comuni medicazioni, le soffici membrane SOFARDRESS presentano il vantaggio di proteggere delicatamente le lesioni, mentre svolgono un drenaggio selettivo dell'essudato, concentrando nel letto delle ferite i fattori naturali nutritivi che servono per la rigenerazione cellulare, creando inoltre localmente un microambiente caldo-umido ad ossigenazione costante, ideale per accelerare il processo di rigranulazione cellulare.

La linea SOFARDRESS presenta medicazioni in vari formati e con membrane in due spessori: 2 mm e 4 mm.

Indicazioni

SOFARDRESS – non adesiva svolge una specifica funzione complementare nei processi di cicatrizzazione finalizzata al trattamento locale delle ferite acute e croniche con elevato e scarso essudato.

| Ferite ACUTE | Ferite CRONICHE |
|---------------------------------------|---|
| Ustioni di I° e II° grado | Piaghe da decubito dal I° al IV° stadio |
| Lacerazioni traumatiche | Ulcere varicose |
| Abrasioni ed escoriazioni | Ulcere arteriose |
| Lesioni dermatologiche in genere | Ulcere diabetiche |
| Ferite post-chirurgiche | Ferite cronicizzate degli anziani |
| Aree di prelievo e di innesto cutaneo | |

SOFARDRESS – non adesiva è adatta per medicazioni con bendaggio elasto-compressivo nelle ulcere venose; può anche essere usata nel trattamento di ferite infette o con rischio di infezione, sotto la supervisione del medico. Inoltre l'uso di SOFARDRESS in combinazione con un gel aiuta lo sbrigliamento autolitico dei tessuti necrotici.

Istruzioni per l'uso

Preparazione della ferita alla medicazione

- 1) Preparare la ferita seguendo un protocollo standard o secondo le istruzioni del medico.
- 2) Detergere la ferita mediante irrigazione di una soluzione salina sterile, usando per esempio SOFARCLEAN. Ove necessario rimuovere dalla lesione il materiale estraneo, i detriti cellulari e il tessuto devitalizzato mediante strumenti idonei, oppure con l'aiuto dell'azione meccanica di un getto di soluzione fisiologica sterile, come quello prodotto, per esempio, con la bomboletta pressurizzata di SOFARCLEAN.
- 3) Asciugare accuratamente la cute integra circostante la ferita, senza toccare la cute lesa. Ove necessario, radere i peli intorno alla ferita.
- 4) Scegliere una medicazione di dimensione adatta a coprire interamente la ferita oltre i suoi bordi di circa 2 cm su ogni lato. Qualora fosse necessario applicare due o più medicazioni collimanti tra loro o tagliarle per coprire adeguatamente l'area interessata. **SOFARDRESS – non adesiva** si adatta facilmente anche a particolari zone del corpo.

Applicazione della medicazione

Liberare la medicazione dalla sua confezione, evitando di toccare la parte che andrà a contatto della ferita. Centrare delicatamente la medicazione sulla ferita e fissarla accuratamente con un nastro adesivo o una medicazione secondaria idonea. La superficie esterna di SOFARDRESS deve rimanere comunque visibile per permettere di accertarne il grado di saturazione dell'essudato, da cui dipende la scelta del momento in cui deve essere ricambiata la medicazione.

Rimozione e ricambio della medicazione

SOFARDRESS può rimanere in situ fino a sette giorni, compatibilmente alle condizioni del paziente e al livello dell'essudato. Inizialmente può rendersi necessario il ricambio della medicazione anche più volte al giorno, ciò a causa dell'incremento dell'essudato che si osserva normalmente nel corso dei primi giorni. La parte esterna di SOFARDRESS va ispezionata frequentemente per accertare il grado di saturazione dell'essudato che, quando raggiunge il 75% della superficie della medicazione, va rimossa e sostituita con una nuova. Per quanto possibile bisogna impedire che l'essudato trapeli oltre il bordo della ferita, sulla cute circostante, per evitare il rischio di macerazione del tessuto sano. Tra un cambio e l'altro, salvo casi particolari (es.: contaminazione, infezione) o parere medico, è sconsigliabile detergere o irrigare il letto della ferita con soluzione fisiologica e tanto meno con soluzioni disinfettanti. La pulizia fisica della ferita potrebbe nuocere al processo di rigranulazione cellulare e ritardarne la guarigione.

Precauzioni

Assicurarsi che la medicazione sia stata applicata correttamente, con la superficie lucida all'esterno. Non usare la medicazione su pazienti con accertata sensibilità al poliuretano in pellicola o schiuma. Per la detersione della ferita non bisogna usare soluzioni ossidanti, come ipoclorito e acqua ossigenata, che danneggerebbero la schiuma di poliuretano. SOFARDRESS va impiegata una sola volta e gettata dopo l'uso.

Conservazione

SOFARDRESS va mantenuto in luogo fresco ed asciutto e lontano dalla luce.

NON CONTIENE LATTICE NE' PRODOTTI ANIMALI – NON E' RIUSABILE – NON E' RISTERILIZZABILE –
NON USARE SE LA BUSTA DELLA MEDICAZIONE PRESENTA ROTTURE O E' APERTA – USARE ENTRO
LA DATA STAMPATA SULLA CONFEZIONE.

Fabbricante: Soveta Baltica Ltd. Kalvariju 125, Vilnius 08221, Lithuania

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA:

SOFAR S.p.A., Via Firenze 40 – 20060 Trezzano Rosa MI

Tel. 02.909362.1 – Fax 02.90967239 e-mail: info@sofarfarm.it

