

Medicazione in Idroalginato con argento

Non utilizzare se la singola busta è danneggiata o aperta.

Descrizione del prodotto

Tegaderm™ Alginate Ag è una medicazione altamente assorbente, sterile, non tessuta, antimicrobica composta da alginato di calcio ad alta concentrazione di G (acido gulturico), da carbossimetilcellulosa (CMC) e da un complesso di argento ionico (Argento Sodio Idrogeno Zirconio Fosfato) che in presenza dell'essudato della lesione permette uno sbrigliamento autolitico e rilascia ioni di argento. Mentre l'essudato viene assorbito, l'alginato forma un gel che contribuisce a mantenere l'ambiente umido, ideale per la guarigione della lesione. Il gel assicura la rimozione in un unico pezzo, senza danni al tessuto in fase di guarigione.

Gli ioni Argento rilasciati in presenza dell'essudato della ferita sono agenti antimicrobici efficaci contro un ampio spettro di microrganismi, spesso responsabili della colonizzazione batterica e dell'infezione delle ferite, attivi fino a 21 giorni, sulla base di studi in vitro. Tegaderm™ Alginate Ag può anche ridurre l'odore delle ferite infette, come risultato delle efficaci proprietà antimicrobiche.

Tegaderm™ Alginate Ag forma una barriera efficace contro la penetrazione dei microrganismi

Indicazioni

Tegaderm™ Alginate Ag è indicato per le ferite con essudato moderato o elevato, a spessore parziale o totale, tra cui:

- Ferite post-operatorie
- Ferite traumatiche (lesioni dermiche, tagli o incisioni)
- Ulcere vascolari
- Ulcere da pressione
- Ulcere diabetiche
- Sedi di innesto o siti donatore
- Ferite cavitare
- Ustioni superficiali e profonde.

Poichè Tegaderm™ Alginate Ag contiene alginato, può aiutare nel controllare moderati sanguinamenti in ferite superficiali.

Questo prodotto può essere usato sotto bendaggi compressivi.

Tegaderm™ Alginate Ag può essere usato nella gestione di ulcere infette o di quelle in cui ci sia un aumentato rischio di infezione, sotto controllo medico.

Tegaderm™ Alginate Ag è indicato per uso esterno.

Controindicazioni

Tegaderm™ Alginate Ag non è indicato nei seguenti casi:

- Ferite asciutte o lievemente essudanti
- Individui con una sensibilità nota agli alginati o all'argento
- Elevato sanguinamento
- Trapianti chirurgici

Precauzioni

La medicazione può aderire se utilizzata su ferite asciutte o con scarsissimo essudato. Se la medicazione aderisce e non si rimuove facilmente, inumidire con soluzione fisiologica sterile prima di rimuoverla.

La performance della medicazione può essere ridotta dall'uso eccessivo di unguenti a base di petrolo.

Evitare il contatto con elettrodi o gel conduttivi durante misurazioni elettroniche come ad es. gli elettrocardiogrammi (ECG) e gli elettroencefalogrammi (EEG).

La medicazione deve essere rimossa prima di effettuare una Risonanza Magnetica (MRI).

Nel caso di un'infezione, l'argento topico non sostituisce la necessità di una terapia sistemica o di un altro efficace trattamento dell'infezione.

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparazione del sito:

- Sbrigliare la lesione se necessario e irrigarla, rispettando il protocollo in uso.
- Rimuovere la soluzione in eccesso dalla cute perilesionale.

Scelta della medicazione

- Selezionare una misura di Tegaderm™ Alginate Ag che sia leggermente più grande della ferita.

Applicazione della Medicazione

1. Tagliare (usando forbici *sterili*) o piegare la medicazione per adattarla alla lesione.
2. Applicare direttamente al letto della ferita. Riempire delicatamente le ferite profonde, verificando che la medicazione non ne ricopra i bordi.
3. Coprire e fissare Tegaderm™ Alginate Ag con una medicazione secondaria non occlusiva.

Cambio e rimozione della medicazione

1. Tegaderm™ Alginate Ag può restare in situ fino a **7 giorni**. La frequenza di cambio delle medicazioni dipende dalle condizioni della lesione e dal livello di essudato. Inizialmente può essere necessario cambiare la medicazione ogni **24 ore**.
2. Riapplicare Tegaderm™ Alginate Ag quando la medicazione secondaria è saturata o quando la pratica suggerisce di cambiarla.
3. Per riapplicarla, rimuovere delicatamente la medicazione secondaria.
4. Se la ferita è asciutta, saturare la medicazione con soluzione salina sterile prima della rimozione.
5. Rimuovere delicatamente la medicazione dal letto della ferita e buttarla.
6. Se necessario, irrigare il sito seguendo i protocolli in uso, prima di applicare una nuova medicazione.

Ferite infette

1. Se la ferita è infetta, occorre iniziare un appropriato trattamento medico.
2. L'applicazione di Tegaderm™ Alginate Ag può essere continuata a discrezione del personale sanitario.

Conservazione

Mantenere a temperatura ambiente (sotto i 25°C).

Non contiene prodotti di origine animale.

La data di scadenza del prodotto è stampata sulla confezione.

SIMBOLI USATI IN ETICHETTA



Il prodotto e la confezione non contengono lattice di gomma naturale