

Suturatrice Meccanica Circolare Monouso per trattamento Emorroidale e Prolasso Rettale - CHEX

CODICE	MODELLO
253CPH32	Suturatrice Meccanica Circolare Retta, diametro esterno 32,5 mm codice colore BIANCO , dimensione punto: alt. 4,2mm larg. 3,8mm.
253CPH34	Suturatrice Meccanica Circolare Retta, diametro esterno 34,5 mm codice colore VERDE , dimensione punto: alt. 4,2mm larg. 3,8mm.
253CPH34HV	Suturatrice Meccanica Circolare Retta, diametro esterno 34,5 mm, testina trasparente a volume maggiorato, codice colore VERDE dimensione punto: alt. 4,2mm larg. 3,8mm.
* 253CPH36SMS	Suturatrice Meccanica Circolare Retta, diametro esterno 36,5 mm, testina di raccolta a volume maggiorato, codice colore VERDE dimensione punto: alt. 4,2mm larg. 3,8mm.

FABBRICANTE:	Suzhou Frankenman Medical Equipment Co.Ltd (Cina)
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO:	INNOVAMEDICA SPA – Cusago, MI (Italia)

MODELLO	DIMENSIONE DEL PUNTO	DIAMETRO ESTERNO	DIAMETRO TAGLIO	QUANTITA DI PUNTI	FILE PUNTI	VOLUME TESTINA	ALTEZZA P.TO CHIUSO
CPH32	Alt. 4,2mm Larg. 3,8mm	32,5 mm	24 mm	32	2	17.17 cm ³	0,75 – 1,5 mm
CPH34	Alt. 4,2mm Larg. 3,8mm	34,5 mm	26 mm	32	2	20.60 cm ³	0,75 – 1,5 mm
CPH34HV	Alt. 4,2mm Larg. 3,8mm	34,5 mm	26 mm	32	2	25.13 cm ³	0,75 – 1,5 mm
CPH36SMS	Alt. 4,2mm Larg. 3,8mm	36,5 mm	28,4 mm	36	2	28.00 cm ³	0,75 – 1,5 mm

Descrizione:	<p>Suturatrice Circolare monouso per il trattamento chirurgico delle emorroidi e la cura del prollasso del retto (CPH) completa di accessori.</p> <p>Il trattamento chirurgico della patologia emorroidaria e dei difetti della parete anorettale viene realizzato mediante sutura e resezione transanale di tessuto mucoso e sottomucoso e muscolare del retto. Il risultato è l'ostruzione del reflusso dei vasi emorroidali riportando i tessuti alle condizioni fisiologiche di normalità.</p> <p>La sutura dei tessuti viene realizzata tramite posizionamento di una doppia fila sfalsata di punti in titanio di grado medicale e attraverso la successiva fuoriuscita di una lama circolare a profilo continuo si ottiene la resezione dei tessuti in eccesso e conseguente anastomosi circolare.</p> <p>L'impugnatura garantisce la massima ergonomia e facilità d'uso, dotata di indicatore di avvicinamento e leva rossa di sicurezza.</p> <p>Leva posteriore ad alette per l'avanzamento/chiusura del trocar a rapporto avvicinamento/rotazione variabile (ad 1/3 dalla chiusura dell'incudine il rapporto avvicinamento/rotazione viene ridotto di 1/3) per garantire maggior precisione nell'avvicinamento e chiusura dei tessuti.</p> <p>Il codice HV (High Volume) identifica una suturatrice con un case di volume maggiorato e trasparente che consente la visione del tessuto prima della resezione.</p> <p>La suturatrice CPH36sms, grazie a un più elevato numero di graph in titanio, un diametro di taglio e un volume geometrico della camera di raccolta maggiorati, offre una capacità di resezione maggiore garantendo la massima emostasi e la</p>
---------------------	---

	massima sicurezza nel confezionamento dell'anastomosi. La parte inferiore della camera di raccolta è inoltre conformata per facilitare la trazione del tessuto in modo omogeneo anche nelle procedure STARR di resezione a tutto spessore. La suturatrice viene fornita completa dei seguenti accessori: Introduttore anale, doppio anoscopio maschio/femmina, accessorio ad alette per sutura a borsa di tabacco, uncino per recupero filo di sutura.
Area di applicazione:	Prodotto sterile per Sala Operatoria.
Confezione:	In blister singolo sterile/box 3 pezzi. Confezionamento interno: accoppiato carta/laminato plastico
Classe:	IIB
Metodo di sterilizzazione:	Raggi Gamma
Durata:	5 anni dalla data di sterilizzazione
Marchi e Certificazioni:	Prodotto marcato CE conforme alla direttiva CEE 93/42 Organismo Notificato n. 0123
Codici CND	H02020203
Repertorio N.	253CPH32 - 253CPH34 - 253CPH34HV: 6142/R 253CPH36SMS: 1147500/R