

Scheda Tecnica

DISPOSITIVO DI INSERIMENTO MINIMED™ SIL-SERTER™ MMT-385

Medtronic

MINIMED™ SIL-SERTER™

Dispositivo di inserimento
per set di infusione
MiniMed™ Silhouette™

CODICE: MMT-385



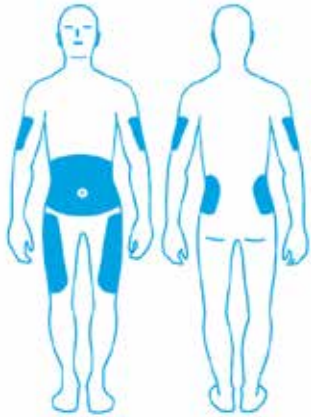
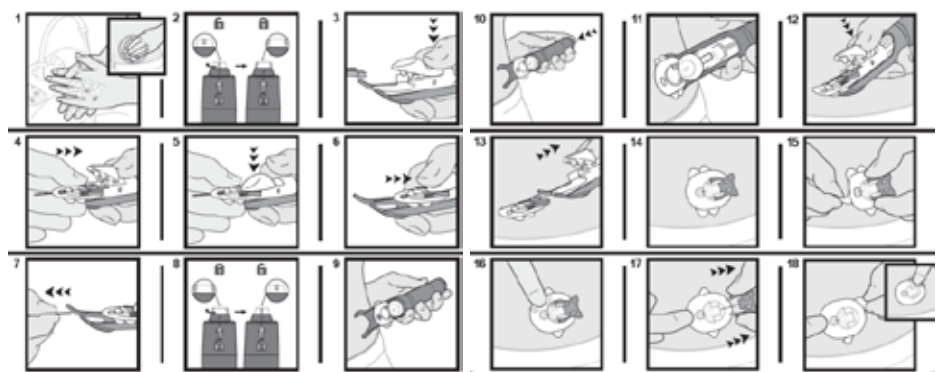
Descrizione e Indicazioni di utilizzo

Descrizione e indicazione d'uso:	MiniMed™ Sil-serter™ è un dispositivo di ausilio per il posizionamento dei set di infusione MiniMed™ Silhouette™ nel sottocute, con sistema di caricamento a molla e pulsante di rilascio a scatto, particolarmente indicato in caso di difficoltà ad inserire il set manualmente.
Avvertenze:	<p>Se prima dell'inserimento il set di infusione non viene posizionato correttamente nel dispositivo di inserimento con l'ago puntato in avanti, il paziente potrebbe provare dolore o subire piccole lesioni.</p> <p>Non puntare mai il dispositivo di inserimento caricato verso qualsiasi parte del corpo in cui non si desideri praticare l'inserimento.</p> <p>Preparare adeguatamente il sito prima dell'inserimento del set di infusione stesso.</p> <p>Prima dell'inserimento, assicurarsi che il cappuccio di protezione dell'ago sia stato rimosso.</p>

Informazioni

Nome prodotto:	Dispositivo di inserimento MiniMed™ Sil-serter™
Fabbricante:	Medtronic Minimed 18000 Devonshire Street Northridge CA, 91325 USA
Società autorizzata alla commercializzazione in Italia:	Medtronic Italia S.p.A. Via Varesina, 162 20156 – Milano (MI)
Marchio CE:	N° 8857
Classe CE di appartenenza:	Classe I, allegato VII (Direttiva Europea 93/42/EEC concernente i dispositivi medici di classe recepita nella legislazione italiana con D. Lgs. n. 46 emendato col D. Lgs. 25.01.2010, n.37 - recepimento Direttiva 2007/47/CE)
Codice GMDN:	12727 – Needle introducer
Codice CND:	A018003, INTRODUTTORE PER AGHI
N° di repertorio	45248/R
Manutenzione e pulizia	<p>Pulire il dispositivo di inserimento strofinando con acqua saponata, utilizzando un detergente liquido o un altro sapone per uso domestico. Risciacquare il sapone dal dispositivo strofinando con acqua pulita. Lasciare asciugare.</p> <p>Disinfettare il dispositivo di inserimento con una soluzione di candeggina al 9% o di alcol isopropilico al 70%.</p> <p>Conservare il dispositivo di inserimento in posizione di rilascio per ottimizzare le sue prestazioni e la sua durata dispositivo in ottime condizioni e farlo durare a lungo.</p>
Confezionamento	Confezione singola da 1 pezzo.

Specifiche tecniche

Tipo di utilizzo:	riutilizzabile, non sterile, non sterilizzabile
Aree di applicazione raccomandate:	<p>Le zone raccomandate per l'inserzione del set infusionale sono illustrate nella figura a fianco:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zona addominale • Fianco/Alto gluteo • Esterno coscia • Parte esterna del braccio <p>Effettuare una corretta rotazione periodica del sito di inserzione per assicurare un'ottimale assorbimento del farmaco e ridurre la possibilità di reazioni cutanee.</p> 
Modalità di applicazione:	Il set di infusione Silhouette può essere posizionato nel sottocute manualmente o con l'aiuto di un dispositivo di inserzione dedicato: Sil-serter (MMT-385) .
Posizionamento con insertore Sil-serter:	
Materiali:	policarbonato
Modalità di conservazione:	Conservare il dispositivo di inserimento nella posizione scarica (molla non caricata) per garantire prestazioni e durata ottimali.
Assenza di lattice:	Il prodotto NON contiene resine e gomme naturali (lattice) che rappresentino un potenziale allergenico.