

SCHEDA TECNICA

Nome Commerciale	Sanyrène
-------------------------	----------

ILLUSTRAZIONE



Descrizione Prodotto	<p>Sanyrène è un'emulsione topica a base di gliceridi iperossigenati, acidi grassi essenziali, fitosteroli e vitamine per la prevenzione delle lesioni da pressione, per la prevenzione e il trattamento delle alterazioni dell'integrità cutanea (eritema e cute fragile)</p> <p>Misure disponibili: Flacone spray da 20 ml</p>
Prodotto da	Laboratoires URGO - 21300 Chênove - FRANCE
Officina di produzione	Laboratoires URGO, 2 avenue de Strasbourg Parc Excellence 2000 - 21000 Chevigny Saint Sauveur, FRANCE
Rappresentato in Italia da	Urgo Medical Italia S.r.l. – Via Washington, 70 - 20146 Milano - ITALIA
Certificazione	CE
Ente certificatore	Non previsto
Classe di rischio	Classe I b
Codice CND	M9002
N° repertorio	1971178/R
Codice prodotto	552546

INFORMAZIONI TECNICHE

Composizione: emulsione a base di gliceridi iperossigenati, acidi grassi essenziali (linolenico, linoleico – 60%, palmitico e stearico), fitosteroli e tocoferolo (vit.E) al 99%.
Contiene profumo d'anice all'1%.

Meccanismo d'azione

La particolare composizione di Sanyrène, fatta di acidi grassi essenziali e vitamine, aiuta a prevenire la disidratazione cutanea, a riequilibrare il film idrolipidico, oltre che ad accelerare il rinnovamento cellulare e a mantenere un adeguato livello d'ossigenazione dei tessuti.

Sanyrene ha dimostrato di ridurre del 50% il rischio di sviluppare una lesione da pressione¹ attraverso:

- la stimolazione della microcircolazione²
- la rigenerazione della cute stimolando il rinnovamento cellulare (rinnovamento completo è 20% più rapido con Sanyrene rispetto alla cute senza trattamento)³
- la protezione della cute del paziente rinforzando la barriera epidermica (la cute trattata con Sanyrene dimostra un indice di idratazione più elevato grazie al miglioramento del ruolo fisiologico della barriera cutanea)³
- la prevenzione della disidratazione e l'idratazione della pelle (il punteggio di secchezza cutanea è inferiore del 58% nelle aree trattate con Sanyrene)³

1. GIPPS Study: S. Meaume et al. Preventing the occurrence of pressure ulceration in hospitalized elderly patients. Journal of Wound Care 2005; 14(2): 78-82.
2. Colin D., Chomard D., et al. An evaluation of hyperoxygenated fatty acid esters in pressure sore management. J. Wound Care. 1998; 7:71-72
3. Evaluation in vivo in a human of the effect of the product Sanyrene in the epidermal renewal and the skin biomechanical properties. Laboratoire Dermascan 1994 Report No. 94110 – Laboratoires Urgo

INDICAZIONI e ISTRUZIONI D'USO

Indicazione:

Sanyrene è indicato per la prevenzione delle lesioni da pressione (I° grado).

Sanyrene è indicato per il trattamento e la prevenzione:

- dell'eritema non sbiancabile (arrossamento reversibile),
- della cute secca e disidratata,
- della cute fragile dovuta a condizioni di macerazione
- della cute con bassa resistenza cutanea e compromissione trofica (i.e. dermatosi secca e squamosa, cute peri-lesionale di ulcere vascolari)

Applicare 1-2 spruzzi di Sanyrene sulle aree cutanee a rischio di sviluppare una lesione da pressione (tallone, sacro)

Strofinare delicatamente la sostanza per un minuto con le punte delle dita fino al completo assorbimento del prodotto.

Ripetere l'operazione su ogni area cutanea a rischio 3 a 4 volte al giorno, ad ogni cambio posturale o a seconda delle necessità.

Monouso	NO
Sterile alla vendita	NO
Mesi validità	A confezionamento integro ed in corretto stato di conservazione: 36 mesi
Presenza di Lattice	No
Confezionamento	Flacone spray confezionato singolarmente
Temperatura di conservazione	Conservare a temperatura ambiente lontano da fonti di luce e di calore
Biocompatibilità	Si